


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τα απλά γάντια (τύπου latex) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν απαιτείται και μετά από την χρήση τους, δεν θα πρέπει να πλένονται αλλά να απορρίπτονται στα κοινά απορρίμματα, τα οποία στην συνέχεια θα πρέπει να απορριφθούν αποκλειστικά και μόνο στους πράσινους κάδους απορριμμάτων.

Μετά την αφαίρεση των γαντιών και πριν την τοποθέτηση νέων, μεσολαβεί πάντα πλύσιμο των χεριών (με ζεστό νερό και σαπούνι).

Τα γάντια αφαιρούνται γυρίζοντας την έσω επιφάνεια προς τα έξω και προσέχοντας οι εξωτερικές επιφάνειες να μην αγγίζουν τις εσωτερικές.

Η σωστή τεχνική εξαγωγής των γαντιών μίας χρήσης προϋποθέτει ότι δεν αγγίζουμε την εξωτερική επιφάνεια των γαντιών με γυμνά χέρια και παρουσιάζεται στις ακόλουθες εικόνες.

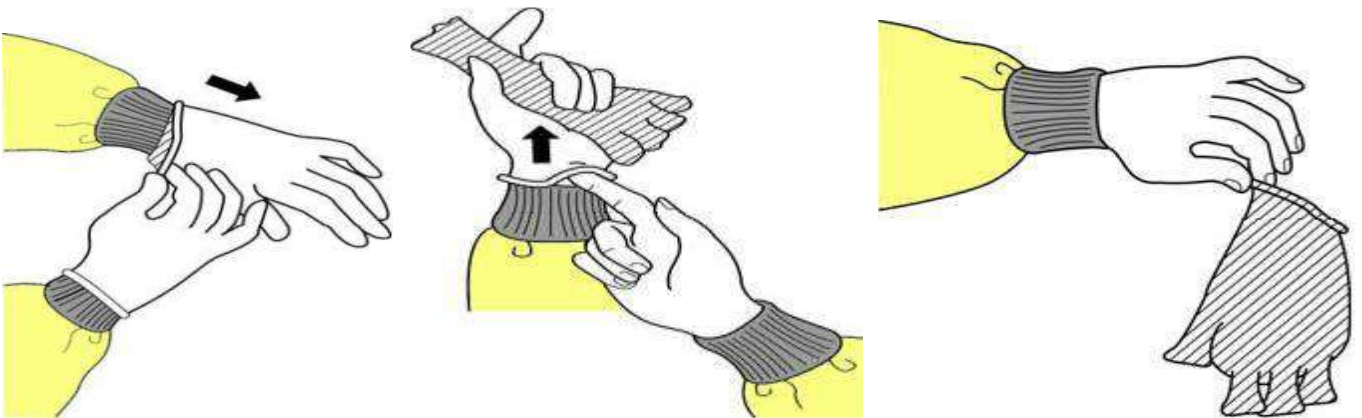

(Πηγή : ΕΟΔΥ)

(1) Πιάστε το εξωτερικό μέρος του γαντιού, στο σημείο που βρίσκεται κοντά στον καρπό και	(3) Κρατήστε το με το άλλο χέρι που έχει ακόμα το γάντι και	(5) Τραβήξτε από μέσα προς τα έξω, δημιουργώντας ένα σακουλάκι και για τα δύο γάντια και
(2) Τραβήξτε προς τα έξω το γάντι γυρίζοντας ταυτόχρονα το μέσα – έξω.	(4) Εισάγετε το δάκτυλο του χεριού που δεν έχει γάντι κάτω από το γάντι, στο σημείο του καρπού.	(6) Απορρίψτε τα γάντια αποκλειστικά στα κοινά σκουπίδια και στην συνέχεια στους πράσινους κάδους.